

URSAPHARM eusan		0106499244 - C.T.T.V	
Kunde:	URSAPHARM - Export VN	Lackierung:	/
Produkt:	PB HYLO-COMOD 10 ml PRO VN	Lackausparung:	☐ /
Art.-Nr.:	90.4017	Pharmacode:	1861
Format:	185 x 275 mm (Plato)	Zusatzspezifikation:	/
Blindenschrift (FS):	JA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	60 g/gm - Offsets UPM Fine / Amber Graphic / Sara Medica / Primabrite Brilliant	Kleinste Schriftgröße:	11 pt
Kleber (EF):	/	Farbtoleranz vorhanden:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 1:	☒ Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 2:	☐ /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	☐ /		
Farbe 4:	☐ /		
Farbe 5:	☐ /		
Farbe 6:	☐ /		
Farbe 7:	☐ /		
		Korrekturabzug Nr.:	1 (Mock-up)
		Erstellt:	12.08.2024 C. Staab
		Freigabe Kunde:	
		Endfreigabe/Gut zum Druck:	

HYLO COMOD

Natri hyaluronate 1 mg/ml

TÊN THIẾT BỊ Y TẾ: Sản phẩm chăm sóc mắt HYLO COMOD

ĐINH LƯỢNG: lọ 10ml dung dịch nhỏ mắt tương đương với khoảng 300 giọt.

THÀNH PHẦN: natri hyaluronate 1mg/ml, citric acid, natri citrate, sorbitol và nước. Dung dịch nhỏ mắt vô trùng 10ml, không chứa phosphate và không chứa chất bảo quản.

XUẤT XỨ: Cộng Hòa Liên Bang Đức.

NHÀ SẢN XUẤT/ CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH.

Địa chỉ: Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, CHLB Đức.

HẠN SỬ DỤNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất, xem "Hạn SD:" trên bao bì sản phẩm.

SỐ LÔ SẢN XUẤT: xem "Lô SX:" trên bao bì sản phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Nếu mắt bị ngứa, rất hoặc dễ mẩn, nếu có cảm giác như bị sạn trong mắt, điều này có thể là do bề mặt mắt thiếu độ ẩm. Ví dụ: nếu ở trong phòng máy lạnh lâu hoặc sau khi làm việc với máy tính cường độ cao, lớp màng nước mắt tự nhiên thường bao phủ bề mặt mắt sẽ bốc hơi nhanh. Để mô mắt hoạt động đầy đủ, cần được bôi trơn liên tục bởi một màng nước mắt.

Do can thiệp phẫu thuật trên mắt hoặc sau chấn thương mắt, sự tiết nước mắt sinh lý có thể bị giảm. Tuy nhiên, để tái tạo các mô bề mặt của mắt, cần phải bôi trơn đủ và liên tục. Việc áp dụng HYLO COMOD cung cấp độ ẩm lâu dài cho giác mạc và kết mạc để quá trình hồi phục sự tiết nước mắt sinh lý được hỗ trợ một cách hiệu quả.

HYLO COMOD chứa muối natri của acid hyaluronic, một chất tự nhiên được tìm thấy trong mắt cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Do tính chất vật lý đặc biệt, nó tạo thành một lớp màng ẩm bôi trơn thường xuyên, ổn định, lâu dài trên bề mặt mắt mà không dễ bị rửa trôi. Tuy nhiên, nó không gây mờ mắt và bảo vệ mắt bạn khỏi bị khô và kích ứng trong thời gian dài.

Điều này đặc biệt quan trọng nếu đeo kính áp tròng vì kính áp tròng cần được ngâm trong một lượng nước mắt đủ để không gây khó chịu. HYLO COMOD có thể được sử dụng khi đeo kính áp tròng. Việc đeo kính áp tròng sẽ trở nên thoải mái hơn khi sử dụng HYLO COMOD nhờ việc không hình thành lớp vôi cặn hoặc các lắng đọng trên kính.

Vì HYLO COMOD không có chất bảo quản nên nó thường được dung nạp rất tốt. Ngoài ra HYLO COMOD không chứa các gốc phosphate vì vậy tránh được các biến chứng như hiện tượng tạo sạn với lắng đọng trên giác mạc.

Chỉ định: Cải thiện khả năng bôi trơn của bề mặt mắt đối với mắt bị khô, rất hoặc có cảm giác có dị vật do điều kiện môi trường cũng như sau khi can thiệp phẫu thuật nhãn khoa.


Liều lượng: Thông thường, nhỏ một giọt HYLO COMOD 3 lần một ngày vào mỗi mắt. Nếu sử dụng HYLO COMOD thường xuyên hoặc khi các triệu chứng của bạn kéo dài hơn một tuần, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nhãn khoa hoặc dược sĩ.

Cách dùng: Không sử dụng HYLO COMOD nếu niêm phong của bao bì carton bị rách hoặc bị hỏng trước lần sử dụng đầu tiên.



Bước 1:

Mở nắp trước khi sử dụng. Bằng cách giữ tay vào nắp phía trên lọ. Với tay còn lại, xoay và kéo lọ ra khỏi nắp. Ở lần sử dụng đầu tiên, vui lòng quay lọ HYLO COMOD xuống và ấn nhiều lần vào đáy lọ cho đến khi giọt đầu tiên xuất hiện ở đầu phun. Bây giờ, lọ đã sẵn sàng để sử dụng.

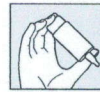

Bước 2:

Giữ lọ chúc xuống với ngón tay cái đặt ở thành trên của lọ, các ngón khác đặt ở đáy lọ.



Bước 3:

Hỗ trợ tay cầm lọ COMOD bằng tay còn lại như hình vẽ.

URSAPHARM

90.4017 Cxx

**Bước 4:**

Trong quá trình sử dụng, tránh để đầu nhỏ tiếp xúc với mắt hoặc da. Ngửa đầu về phía sau, nhẹ nhàng kéo xuống mí mắt dưới và ấn một lực mạnh và nhanh vào giữa đáy lọ. Việc này giúp hình thành một giọt dung dịch. Với thiết kế hệ thống van COMOD đặc biệt, kích cỡ và tốc độ của mỗi giọt dung dịch đều bằng nhau cho dù lực ấn khác nhau. Từ từ nhắm mắt lại để cho dịch trải đều trên bề mặt mắt.

**Bước 5:**

Đậy nắp ngay sau khi sử dụng. Chú ý đảm bảo đầu nhỏ phải khô.

Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất / chủ sở hữu số lưu hành nếu có bất kỳ thắc mắc về cách sử dụng đúng của thiết bị y tế này.

Lọ HYLO COMOD chứa 10ml dung dịch được quy đổi tương đương với 300 giọt. Vì lý do kỹ thuật, một lượng nhỏ dung dịch sẽ còn sót lại sau khi sử dụng hết.

HYLO COMOD có thể được sử dụng trong khoảng thời gian không giới hạn.

HYLO COMOD chỉ được sử dụng cho bạn, thậm chí ngay cả những người khác có các triệu chứng tương tự cũng không nên sử dụng chung lọ dung dịch nhỏ mắt của bạn

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cảm thấy không tốt hơn hoặc nếu tình trạng xấu hơn sau vài ngày sử dụng, hãy hỏi tư vấn với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nếu dùng dung dịch nhỏ mắt khác, hãy đảm bảo thời gian tối thiểu 30 phút giữa các lần nhỏ dung dịch. Nên dùng HYLO COMOD cuối cùng. Tuy nhiên, mỡ tra mắt luôn luôn được sử dụng sau khi đã nhỏ HYLO COMOD.

Do không chứa chất bảo quản, HYLO COMOD được dung nạp tốt ngay cả khi điều trị lâu dài. Rất hiếm các trường hợp xảy ra phản ứng phụ như quá mẫn cảm, nóng rát và tăng tiết nước mắt quá mức, đau, cảm giác bị cộm do dị vật hoặc những kích ứng cục bộ tạm thời khác được báo cáo và chấm dứt ngay lập tức sau khi ngưng sử dụng HYLO COMOD.

Xin lưu ý rằng mắt có thể bị nhòe tạm thời sau khi nhỏ HYLO COMOD do độ nhớt của dung dịch nhỏ mắt. Trong một số trường hợp hiếm hoi, điều này có thể gây nhức đầu tạm thời ở những bệnh nhân nhạy cảm.

Có thể dùng HYLO COMOD khi đang đeo kính áp tròng. Sau khi đặt kính áp tròng, khuyến cáo nên chờ 30 phút trước khi nhỏ dung dịch. Điều này giúp tránh được các tương tác có thể xảy ra giữa dung dịch chăm sóc kính áp tròng với HYLO COMOD.

Theo những tài liệu nghiên cứu đã có, có thể dùng HYLO COMOD cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Trong trường hợp có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình sử dụng thiết bị y tế này hoặc do hậu quả của việc sử dụng thiết bị này, vui lòng thông báo cho chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế.

Không sử dụng HYLO COMOD nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không dùng HYLO COMOD quá hạn sử dụng đã được in trên nhãn sản phẩm. Có thể sử dụng sản phẩm trong vòng sáu tháng sau khi mở nắp lần đầu tiên.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN: Bảo quản không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.

NGÀY THÔNG TIN: 08/2024.

Thiết bị y tế

