

OCUVANE[®] PLUS

VN

GẠC LAU MI MẮT

THIẾT BỊ Y TẾ

Các triệu chứng nóng rát, đỏ, kích ứng, khô mắt thường do mắt bị viêm, nguyên nhân có thể do bụi bẩn và các dị nguyên đọng lại trên mi hoặc do nhiễm trùng Demodex gây ra. Việc điều trị viêm lúc này được cho là cần thiết để phục hồi chức năng của các tuyến trên bờ mi, giúp giảm các triệu chứng một cách lâu dài.

Nhờ các thành phần đặc biệt, gạc lau mi **OCUVANE[®] PLUS** làm sạch hiệu quả bụi bẩn và phần hoa động lại trên mi. Sử dụng mỗi ngày giúp ngăn ngừa sự tắc nghẽn của tuyến lệ, khôi phục quá trình sản xuất nước mắt khỏe mạnh. Thành phần hoạt chất chính của tinh dầu trà có tác dụng khử trùng, chống viêm và tái tạo, giúp giảm bớt các triệu chứng một cách lâu dài. Nó cũng có thể được sử dụng cho những người đeo kính áp tròng để giảm bớt sự khó chịu khi đeo kính áp tròng. Điều trị mỗi ngày, các triệu chứng phổ biến nhất như đỏ, khô mắt, ngứa, cảm giác mỏi mắt hoặc dị vật thường sẽ giảm đi trong vài ngày.

Ứng dụng

- Giúp giảm khô mắt, giảm cảm giác nóng rát ở mắt
- Dùng cho những trường hợp mỏi mắt, đỏ mắt
- Điều trị nhiễm trùng Demodex ở mi mắt

Thành phần

Disodium cocoamphodiacetate, terpinen 4-ol (1%), dexpantenol (B5 provitamin), tocopheryl-acetate (vitamin E), polysorbate 20, citric acid, parfum, nước cất

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi sử dụng, rửa sạch tay, sau đó mở gói và lấy miếng gạc **OCUVANE[®] PLUS**.

1. Làm sạch mi mắt và lông mi

Như trong hình, quấn gạc quanh ngón tay trỏ của bạn; sau đó, nhẹ nhàng lau mi mắt từ góc trong ra ngoài.



2. Làm sạch bờ mi

Đứng trước gương, đặt ngón tay lên mi dưới, kéo xuống và giữ mi dưới mở. Quấn gạc quanh ngón trỏ, nhẹ nhàng lau bờ mi theo những vệt dài, trong vài lần. Cần thận để không chạm vào nhãn cầu. Dùng gạc mới để lau mắt còn lại.



Để loại bỏ bụi bẩn tích tụ trên bờ mi, trong những trường hợp nhẹ, hãy lau mỗi ngày một lần vào buổi tối; Với những trường hợp nặng hơn, hãy sử dụng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Cảm giác nóng rát nhẹ trong quá trình sử dụng gạc lau là điều bình thường.



Để phòng và cảnh báo

Không sử dụng gạc lau đã hết hạn sử dụng ghi trên bao bì, hoặc nếu bao bì bị hư hỏng. Rất hiếm khi xảy ra phản ứng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm, với các triệu chứng như cảm giác nóng rát, ngứa, chảy nước mắt, đỏ và sưng mí mắt. Trong những trường hợp như vậy, nên ngừng sử dụng sản phẩm. Các triệu chứng nêu trên sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng việc sử dụng gạc lau nhiều lần không được khuyến khích. Trong trường hợp khi điều trị, các triệu chứng viêm vẫn gia tăng (mắt đỏ, cảm giác dị vật, chảy nước mắt, chảy dịch, đau hoặc mờ mắt), hãy đi khám bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức. Có thể dùng được trong thời kỳ mang thai và cho con bú.



Bảo quản ở nhiệt độ phòng. Tránh xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.



SolMed Pharma Kft.

19 Ady Endre Street,
1024 Budapest
Hungary
Email: info@solmedpharma.hu
www.ocuvane.com

Nhà nhập khẩu và phân phối:

Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển Dược phẩm SUCS
Số 197 Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

www.sucspharma.com

